

INSTRUCTIVO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

**Instructivo para
equipo**

Esterimatic

Modelo:

18 R

12-27 R

36-81 R

**Esterilizador por
calor seco en
convección
natural.**



CAISA®

GARANTÍA

Distribuidora Caiza S.A. de C.V. garantiza sus productos Esterimatic por hasta un (1) año contra defectos de fabricación y 3 meses en partes eléctricas a partir de la fecha de entrega bajo las siguientes condiciones:

1. Distribuidora Caiza S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno para el consumidor, cubriendo los gastos que se deriven para dar cumplimiento a la presente garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del equipo en nuestro centro de servicio, o por parte de la visita del técnico y apertura del ticket de servicio en el caso de equipos Esterimatic.

La garantía será anulada en los siguientes casos:

1. Si el usuario hace caso omiso a las instrucciones de configuración inicial, de las instrucciones de uso, recomendaciones y avisos que se incluyen en el manual de operación de usuario.
2. Si personal no autorizado por Distribuidora Caiza S.A. de C.V. ha intentado reparar el equipo por su cuenta.
3. Si el equipo ha sufrido deterioros físicos graves e irreparables por causas atribuibles al consumidor.
4. Si los sellos de garantía se encuentran rotos, dañados o inexistentes.
5. Si esta póliza de garantía no se encuentra sellada por el distribuidor autorizado o por Distribuidora Caiza S.A. de C.V. e indica la fecha de compra.



Calidad
CAIZA

MANTENIMIENTO

Nuestro centro de servicio CAISA se encuentra disponible para cualquier garantía, refacción o mantenimiento que su equipo requiera. Nuestro equipo de ingenieros especializados podrá ayudarle.

soporte@wsecaisa.com
www.wsecaisa.com

CONTIENE:

- 1 equipo Esterimatic modelo R.
- 3 Charolas de aluminio.
- 1 Maneral.
- Instructivo de uso.
- Póliza de garantía.

Este equipo debe de ser operado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales sean aptas para el uso de aparatos industriales de alta temperatura. Lea con cuidado el instructivo de operación.



Calidad de alto grado°
desde 1959.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desempaque por completo el equipo y sus accesorios. Retire de las charolas el plástico protector. Este puede ser color azul o transparente.
2. Antes de cada uso revise que la cámara del esterilizador se encuentre limpia y libre de materiales extraños.
3. Conecte el esterilizador a una toma de corriente en buen estado. Esta debe de ser de 127V ~, 60 Hz.
4. Distribuya el instrumental en las charolas proporcionadas. Insértelas en las guías metálicas interiores (hasta 3) y cierre la compuerta del aparato.
5. Gire la perilla superior indicada como “control de temperatura” hacia la derecha hasta llegar a los **170°C**. A continuación gire la perilla inferior “control de tiempo” hacia la derecha y seleccione **60 minutos**. **Después presione el interruptor de encendido** ubicado en el costado derecho del esterilizador. Este comenzará su funcionamiento y el indicador superior se encenderá.
IMPORTANTE: El control de tiempo no avanza como sucedía en los modelos anteriores. NOTA: A partir de este momento no abra la compuerta del esterilizador hasta que el ciclo haya concluido, ya que esto compromete la correcta esterilización del instrumental.
6. El equipo **realizará el ciclo de pre-calentamiento automáticamente** y alcanzará la temperatura programada. Cuando esto suceda, el indicador de luz superior comenzará a parpadear y el inferior se encenderá. Esto permanecerá así hasta que hayan transcurrido los minutos programados en el temporizador.
7. Cuando el tiempo haya terminado, el indicador de luz se apagará y el esterilizador entrará en modo de espera.
8. **Presione el interruptor lateral de “encendido” hacia modo “apagado” para apagar su equipo.**
9. Permita que el instrumental se enfríe antes de retirarlo de la cámara.
10. Abra la compuerta y retire las charolas con el instrumental. El ciclo de esterilización ha concluido.



ESTERCLAVE®

¿Ya conoce ESTERCLAVE®? Es un sistema que le permite esterilizar por medio de calor húmedo a presión (como un autoclave) instrumental médico pequeño. Es compatible con cualquier esterilizador o autoclave.

RECOMENDACIONES Y AVISOS



El instrumental debe de estar limpio y seco para lograr su correcta esterilización. Nunca almacene el instrumental en el esterilizador.

No introduzca ningún elemento, incluyendo el instrumental quirúrgico, con pegamento ya que esto daña irreversiblemente la cámara y anula la garantía.



Nunca sobrecargue el esterilizador de tal manera que impida la correcta transferencia de calor al instrumental. Evite operar el equipo a más de 180°C para procesos de esterilización.

La esterilización por calor seco es segura y económica. La exposición de material metálico a 170°C por 60 minutos brinda esterilización libre de corrosión y no daña el filo ni la soldadura del instrumental.



PRECAUCIÓN

SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, DEBERÁ SER REEMPLAZADO INMEDIATAMENTE POR EL FABRICANTE O POR PERSONAL CALIFICADO.

